


# 鼻腔ぬぐい液 検体採取方法

医療関係者用

患者さまが自己採取される場合には、  
医療従事者の管理下で実施ください

綿棒挿入後  
5回転し、  
5秒程度静置

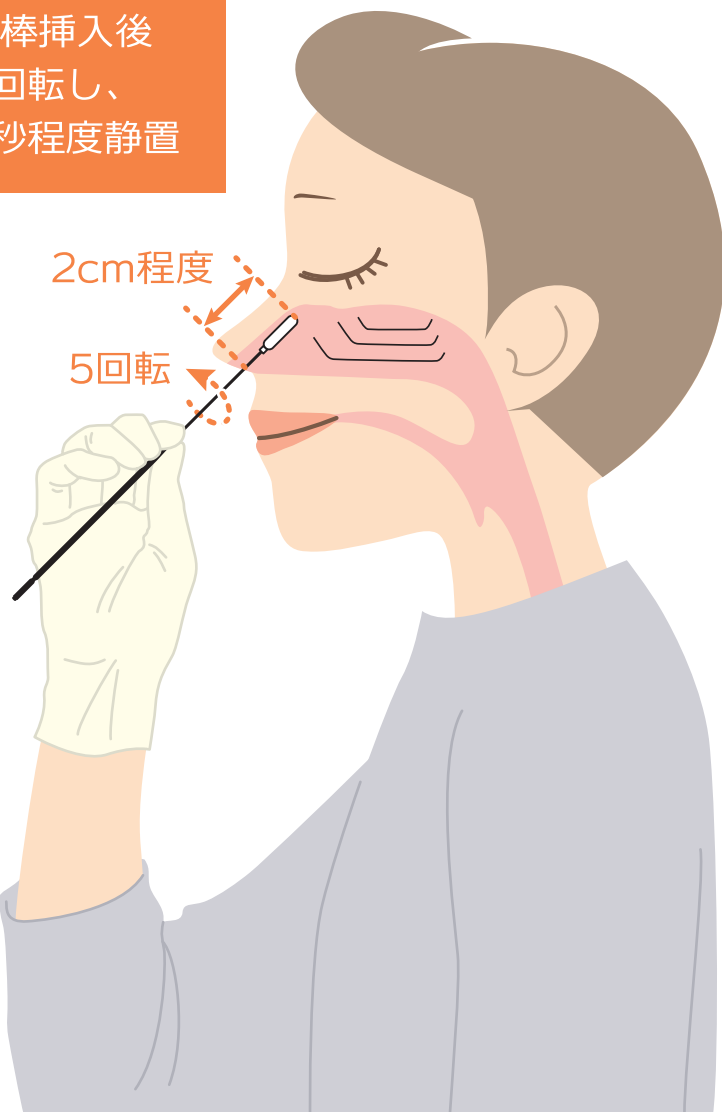

監修：りんくう総合医療センター 感染症センター長 倭 正也 先生

1

綿棒を鼻孔入り口から2cm程度、  
粘膜部分をぬぐうようにしてゆっくり挿入します

2

綿棒を5回程度ゆっくり回転させます

3

5秒程度静置し、綿球を十分湿らせた後、  
そっと引き抜きます

4

採取した綿棒を  
所定の容器へ入れます

容器例

