

インフルエンザウイルスキット

**エスプライン<sup>®</sup> インフルエンザ A&B-N**

H7N9 亜型インフルエンザウイルスにおける  
反応性について

 **富士シロバイオ株式会社**

お客様コールセンター TEL 0120-292-026

このたび、弊社製品「エスプライン インフルエンザ A&B-N」につきまして、下記 H7N9 亜型インフルエンザウイルスにおける反応性を確認いたしましたので、ご案内申し上げます。

### H7N9 亜型インフルエンザウイルスの反応性(実験データ)

由来	亜型	株	本品	
			A	B
ヒト	H7N9	A/Anhui/1/2013 *1	+	-
アヒル	H7N9	A/duck/Mongolia/119/2008 *2	+	-
	H7N9	A/duck/Mongolia/128/2008 *2	+	-
	H7N9	A/duck/Mongolia/147/2008 *2	+	-
	H7N9	A/duck/Mongolia/129/2010 *2	+	-

\* 1 : 2013年3月に中国においてインフルエンザウイルス(H7N9)感染者から分離された株

\* 2 : 2008年および2010年にモンゴルにおいて野生のアヒルから分離された株

( 北海道大学大学院獣医学研究科微生物学教室・喜田特任教授 データ )