





# エスプライン® インフルエンザA&B-N 仕様変更のご案内

いつも「エスプライン インフルエンザA&B-N」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  
このたび、お客さまのご要望におこたえして、より使いやすくリニューアルいたしました。

## 主な変更点

- ① 試料液のカセット滴下量が **2滴** → **1滴** へ変更いたしました。
- ② 滴下量がひとめでわかるようにカセットへ滴下数を表示、凸部を目のつく色へ着色しました。
- ③ 判定ラインがシャープになり、より判定しやすくなりました。
- ④ 滴下チップも変更（**紫色リング**）いたしました。

## 従来品および変更品 比較表

	従来品	変更品
製品名	エスプライン インフルエンザA&B-N	
価格	10回用:11,000円 / 100回用:100,000円	
製品コード	10回用:293911 100回用:293904	10回用: <b>295526</b> 100回用: <b>295533</b>
化粧箱外観		
カセット個包装		個包装にも「 <b>1drop</b> 」表記 
カセット外観 (A型陽性例)		① 滴下数 ( <b>1drop</b> ) 記載 ② 凸部着色 
滴下チップ	水色リング 	紫色リング 
試料液滴下量	2滴 (約30 μL)	<b>1滴</b> (約20 μL)
反応停止液	3滴	<b>2滴</b>

## 注意点

\*変更品では**試料液は必ず1滴滴下**にて測定をお願いいたします。

2滴以上滴下した場合、反応遅延や反応不良の要因となります。

\*滴下チップは、必ずキットに同封のものをご使用ください。

# 変更品同封イエローカード こちらのイエローカードが同封されます。

**お知らせ**

「エスブライン インフルエンザ A&B-N」につきまして、本製品より操作方法を一部変更いたしました。

**変更点**： 試料液のカセットへの滴下数


旧製品： 滴下数 2滴 (約 30  $\mu$ L)

↓

本製品： 滴下数 1滴 (約 20  $\mu$ L)

滴下数変更に伴い、滴下チップも変更しております。  
**本キットに同封の滴下チップ(紫色のリングがついたもの)をご使用ください。**  
 また、**反応停止液の滴下数も 3滴 から 2滴に変更しております。**

その他の操作方法および製品性能に変更はございません。  
 ご不明な点は、お客様コールセンター(フリーダイヤル 0120-292-026)までお問い合わせください  
 ますようお願い申し上げます。

 **富士レビオ株式会社** UY202

## 従来品との比較

従来品との比較では、**ほぼ 100%の一致率**。  
 従来品と同様に高い感度でご使用いただけます。

臨床検体 1,427 例における従来品と変更品の比較

全体一致率：99.9% (1,426/1,427)

陽性一致率：100% (675/ 675)

陰性一致率：99.9% ( 751/ 752)

全体集計		従来品				
		A+B+	A+	B+	-	計
変更品	A+B+	2	0	0	0	2
	A+	0	542	0	0	542
	B+	0	0	131	1	132
	-	0	0	0	751	751
	計	2	542	131	752	1427

【外部評価データ】(財)ライフ・エクステンション研究所附属永寿総合病院、横浜市立大学附属病院 臨床検査部、さいたま赤十字病院 検査部、小林国際クリニック、座間小児科、市川こどもクリニック

## 製品情報



キット構成(10テスト用)

- ① 反応カセット
- ② 検体処理液
- ③ 反応停止液
- ④ ニプロスポンジスワブTYPE S
- ⑤ 滴下チップ

別売

- ⑥ 検体採取用紙(鼻かみ紙)

	商品コード	製品名	規格	有効期間	価格	備考	貯法
キット	295526	エスブライン インフルエンザ A&B-N	10テスト用	21ヶ月	11,000円	適用検体 ・鼻腔ぬぐい液・咽頭ぬぐい液 ・鼻腔吸引液・鼻かみ液	1~30°C
	295533		100テスト用	21ヶ月	100,000円		
別売	295908	ニプロスポンジスワブ TYPE S *	20本	36ヶ月	2,000円	・鼻腔ぬぐい液用 ・鼻かみ液用	-
	306475	検体採取用紙(鼻かみ紙)	50枚/箱	-	1,000円	・鼻かみ液用	-
	293843	滅菌紙軸綿棒H NS **	30本	38ヶ月	1,200円	・鼻腔ぬぐい液用	-
	293850	滅菌紙軸綿棒H NA・PS **	30本	38ヶ月	1,200円	・咽頭ぬぐい液用 ・鼻腔吸引液用	-
	295540	エスブライン検体処理液	10本	21ヶ月	1,200円	・スクイズチューブ 10本 ・滴下チップ 10個	1~30°C

\* 製造販売元はニプロ株式会社 \*\* 製造販売元はハナコメディカル株式会社 ■ 変更品

**ご不明な点は、弊社お客様コールセンター  
 (フリーダイヤル 0120-292-026)へお問合せください。**



お客様コールセンター ☎ 0120-292-026

学術サポートNET [http://www.fujirebio.co.jp/support/index\\_pre.html](http://www.fujirebio.co.jp/support/index_pre.html)