

お客さま 各位

2011年5月

「エスプライン® インフルエンザ A&B-N」用
滅菌紙軸綿棒 H NS の取扱いについて

富士レビオ株式会社
ハナコメディカル株式会社

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、日頃ご愛顧いただいております弊社インフルエンザウイルスキット「エスプライン® インフルエンザ A&B-N」において、製品に付属品として同梱または別売りしております滅菌紙軸綿棒H NSを用いて、患者さまの鼻腔から検体を採取される際に、使用方法によってまれに綿棒の先端が折損することがあります。

滅菌紙軸綿棒 H NS にて検体を採取する際は、下記の点につきまして十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。

- 1) 綿棒を曲げる、反らす、折り曲げるなど、変形させて使用しないでください。綿棒が破損、破断する恐れがあります。
- 2) 綿棒に無理な力を掛けて使用した場合、折れが生じるのでご注意ください。また、綿棒の折れ等の異常に気づいたときには使用を中止し、速やかに綿棒を交換してください。綿棒が折れた状態でそのまま使用を続けると、綿棒が破断する恐れがあります。
- 3) 綿棒を使用する際には、患者さまの安静状態を維持してご使用ください。安静状態を維持できない患者さまへ使用した場合、患者さまの体が動く等によって綿棒への過度の負荷により、破損、破断するおそれがあります。

上記事項を十分に注意して検体採取を実施いただきますよう、何卒宜しくようお願い申し上げます。

謹白

＜本件に関するお問合せ先＞

富士レビオ株式会社 お客様コールセンター

電話番号：0120-292-026（フリーダイヤル）

FAX 番号：03-5695-9234