



IU07

使用に際してはこの添付文書をよくお読みください。
また、必要な時に読めるように保管しておいてください。

IU07T

**2013年10月改訂（第7版）

*2012年11月改訂（第6版）

体外診断用医薬品

製造販売承認番号：22000AMX01622000

ガストリン放出ペプチド前駆体キット

ルミパルスプレスト® ProGRP

■全般的な注意

1. 本試薬は、体外診断用であるため、それ以外の目的には使用しないでください。
2. 診断の際は、本測定値以外に他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
3. 添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
4. 本試薬および検体は、感染の危険性があるものとして十分に注意して取扱ってください。
5. 本試薬には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれています。試薬が誤って目や口に入ったり、皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。
6. 本試薬の使用に際しては、本書とあわせて使用する測定システムの添付文書および取扱説明書をご参照ください。

■形状・構造等（キットの構成）

ルミパルスプレスト ProGRPは下記構成試薬を組み合わせでご使用ください。

1. **抗体結合粒子（200回用、10mL/ボトル）**
抗ProGRPモノクローナル抗体（2B10、3G2）（マウス）結合フェライト粒子を含みます。
本品は付属品として抗体結合粒子ボトル用のアッセイキャップAを1個含みます。
2. **酵素標識抗体（200回用、10mL/ボトル）**
アルカリホスファターゼ（ALP）標識抗ProGRPモノクローナル抗体（3D6）（マウス）を含みます。
本品は付属品として酵素標識抗体ボトル用のアッセイキャップBを1個含みます。
3. **ProGRPキャリブレーションセット：3濃度×2**
ProGRPキャリブレーション
(1) 0pg/mL ProGRPキャリブレーション（凍結乾燥、0.5mL用×2）
(2) 50pg/mL ProGRPキャリブレーション（凍結乾燥、0.5mL用×2）
(3) 5000pg/mL ProGRPキャリブレーション（凍結乾燥、0.5mL用×2）
ProGRP用溶解用液（液状、5mL×1）
ProGRPキャリブレーションは凍結乾燥品です。ProGRP用溶解用液を用いて調製します。
4. **基質液（液状、100mL×6）**
基質としてAMPDP^{注1}を含みます。
5. **洗浄液（濃縮液、4000mL×1）**
6. **検体希釈液ProGRP（液状、10mL×1）**
本品は付属品としてアッセイキャップBを1個含みます。

注1）AMPDP：3-(2'-spiroadamantane)-4-methoxy-4-(3'-phosphoryloxy)phenyl-1,2-dioxetane disodium salt / 3-(2'-スピロアダマンタン)-4-メトキシ-4-(3'-ホスホリロキシ)フェニル-1,2-ジオキセタン・2ナトリウム塩


■使用目的

血清又は血漿中のガストリン放出ペプチド前駆体〔ProGRP（31-98）〕の測定（悪性腫瘍の診断補助等）

■測定原理

本試薬は2ステップサンドイッチ法に基づいた化学発光酵素免疫測定法によるProGRP測定試薬です。

<反応プロトコール；2ステップモード>

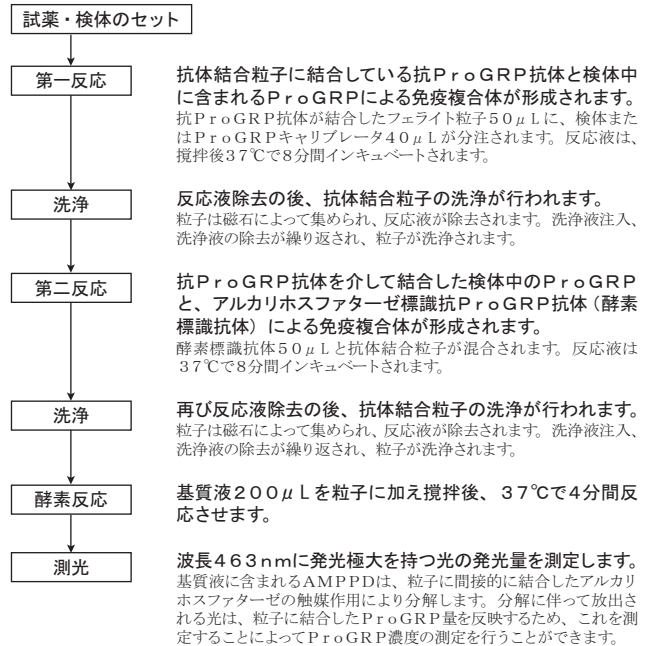

検体中のProGRP濃度が測定範囲を超えた場合は、検体希釈液ProGRPを用いて検体を希釈し再測定してください。

■操作上の注意

1. 測定検体の性質、採取法

- (1) 血清検体においては、凝固過程で産生されるトロンビンの作用によってProGRPが分解される可能性があります。そのため、血清は採血後、3時間以内に測定してください。また、保存する場合は-20℃以下で凍結保存してください。
- (2) トロンビンはProGRPを分解する可能性があるため、凝固促進剤（トロンビン）を含有する採血管は使用しないでください。
- (3) 検体を繰り返し凍結融解することは避けてください。
- (4) 赤血球・その他の有形成分、沈殿物、浮遊物が含まれている検体では、測定値に影響を与える場合があります。正しい結果が得られるように遠心または除去した後に使用してください。
- (5) 検体間の汚染が生じないように検体は注意して取扱ってください。
- (6) 非働化した検体は使用しないでください。
- (7) 検体に抗凝固剤（EDTA-二カリウム、クエン酸ナトリウム、ヘパリンナトリウム、ヘパリンリチウム）を添加して試験した結果、それぞれ10mg/mL、38mg/mL、100U/mL、100U/mLまで測定値に影響は認められませんでした。液状の抗凝固剤を用いる場合は、検体の希釈率にご注意ください。

2. 妨害物質・妨害薬剤

- (1) 検体にビリルビンF、ビリルビンC、ヘモグロビンを添加して試験した結果、それぞれ18.2mg/dL、20.1mg/dL、482mg/dLまで、測定値に影響は認められませんでした。また、乳ビ、リウマチ因子に関しても、それぞれ1670ホルマジン濁度、500IU/mLまで測定値に影響は認められませんでした。

■用法・用量（操作方法）

1. 試薬の調製法

- (1) 抗体結合粒子
冷蔵庫から出してそのまま使用します。
試薬を装置にセットする場合は、試薬を泡立てないようにゆるやかに20回以上転倒混和して、ボトル底部に沈殿している粒子を再懸濁してください。
- (2) 酵素標識抗体
冷蔵庫から出してそのまま使用します。転倒混和はしないでください。
- (3) ProGRPキャリブレーション
常温（15～25℃）に戻してから使用します。
各濃度のProGRPキャリブレーション（凍結乾燥）にProGRP用溶解用液を正確に0.5mL加え、ProGRPキャリブレーション溶液を調製します。ProGRPキャリブレーション溶液は必要量を分取し、そのまま使用します。
デッドボリュームはご使用の測定システムによって異なりますので各測定システムの取扱説明書をご覧ください。一例としてルミパルスPresto IIでサンプルカップをご使用の場合、デッドボリュームは100μLとなります。
- (4) 基質液
冷蔵庫から出してそのまま使用します。

- (5) 洗浄液
測定システムの取扱説明書に従い補充してください。洗浄液は装置内で自動的に精製水で10倍に希釈されます。
- (6) 検体希釈液 ProGRP
冷蔵庫から出してそのまま使用します。転倒混和はしないでください。
- (7) ProGRP用溶解液
冷蔵庫から出してそのまま使用します。

2. 必要な器具・器材

- (1) ルミパルス Presto用サンプリングチップ
- (2) ルミパルス Presto用キュベット
- (3) ルミパルス Presto用アッセイキャップA、アッセイキャップB
- (4) マイクロピペット、サンプルカップ
- (5) 全自動化学発光酵素免疫測定システム
- ** (6) LPコントロール・ProGRP (別売品)
精度管理用試料として、LPコントロール・ProGRPを推奨いたします。使用に際しては、LPコントロール・ProGRPの取扱説明書を参照してください。

3. 測定法

- (1) 測定システムの取扱説明書を参照し、検体および測定に必要な試薬を所定の位置にセットしてください。(サンプルの最少必要量は、使用する容器や測定システムによって異なりますので、各測定システムの取扱説明書をご覧ください。)
- (2) 抗体結合粒子、酵素標識抗体および検体希釈液 ProGRPのボトルキャップを静かに外し、口元に付着している試薬は清潔な紙等でふき取ります。ボトル内に泡立ちが残っているときはしばらく放置して泡立ちがないことを確認するか、または清潔な綿棒等を用いて取除きます。
- (3) アッセイキャップを取付けます。取付け方は、下記の(8)アッセイキャップの取付け方を参照してください。
- (4) ボトルのバーコードが濡れていた、汚れていた場合は、ふき取ってからセットしてください。
- (5) 試薬を試薬保冷庫内のカローセルにセットします。抗体結合粒子はカローセルAに、酵素標識抗体および検体希釈液 ProGRPはカローセルBに、それぞれセットします。試薬は、カローセルの空いている場所のどこにでもセットすることができます。また、装置からカローセルを取出して試薬をセットすることもできます。ボトルをセットした後はカローセルを静かに装置の所定位置へ戻します。
- (6) 基質液は蓋を外し、基質保冷庫へセットします。
- (7) 洗浄液は、測定システムの取扱説明書に従い補充します。
- (8) アッセイキャップの取付け方

アッセイキャップは装置にセットした試薬の蒸発や汚染を防ぐために使用します。新しいボトルを装置にセットする際には、新しいアッセイキャップを取付けてからご使用ください。取付けない場合は、測定結果の信頼性は保証できません。取付けた後は、アッセイキャップに液が付着しないように、装置にセットするまでボトルを傾けないよう注意して取扱ってください。

・アッセイキャップAの取付け方

アッセイキャップAは、抗体結合粒子ボトルの口元に乗せ、回しながら止まるまで締めて取付けます。アッセイキャップAの外側を上から静かに押し(図1)、内部のゴムスリットが開くことを確かめます(図2)。スリットに膜が形成されている場合はアッセイキャップAを一旦取外し、清潔な紙等で裏のゴム表面の液体をふき取り、再びボトルに取付けます。ゴムスリットがきちんと開口しないときや、アッセイキャップAが円滑に動かないときは、再度外側を押して確認します。改善がみられないときは新しいアッセイキャップAに交換してください。



図1: アッセイキャップAを取付け、上から押します。

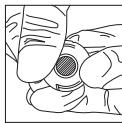


図2: ゴムスリットが開くことをボトル上面から確認します。

・アッセイキャップBの取付け方

アッセイキャップBは、酵素標識抗体ボトルおよび検体希釈液 ProGRPボトルに使用します。取付ける際は、まずボトルキャップを外し代わりにアッセイキャップBをボトル口元に乗せます。図3のように、ボトル上部の鏝(つば)とアッセイキャップB下部の突起が、ぶつかって止まるまで回しながら締めて取付けます。図3の★の位置を上から指で押して、蓋が開くことを確かめます(図4)。ボトルの口に膜が形成されている場合は清潔な紙等で蓋のゴム表面に付着した液体をふき取ってください。アッセイキャップBが締まらないときや、押しでも蓋が円滑に動かないときは一旦取外し、再度取付けます。改善がみられないときは、新しいアッセイキャップBに交換してください。



図3: アッセイキャップBを取付け、★を押します。



図4: 蓋が開くことを確かめます。

- (9) 試薬の他に、測定に必要なサンプリングチップおよびキュベットが十分量投入されていること、精製水タンク、洗浄液タンク、濃縮洗浄剤タンクの残量が十分であることを確認します。
- (10) 分析の受付操作を行います。
- (11) 検体を検体分析用のラックにセットし、装置の所定位置にセットします。精度管理分析の場合は精度管理分析用のラックを、キャリブレーション分析の場合はキャリブレーション分析用のラックをそれぞれ使用します。
- (12) 外箱記載のデータ入力バーコードには、ProGRPキャリブレーションの使用期限およびロット番号が記録されています。装置付属のバーコードリーダーを用いて読み取るにより、キャリブレーションのロット管理を自動的に行うことができます。
- (13) スタートキーを押して測定を開始します。装置内で自動的に実行される動作については測定原理の「反応プロトコル」の項を参照してください。

4. 濃度の算出法

マスターキャリブレーションデータは、酵素標識抗体ボトルの2次元バーコードに記録されています。検体中のProGRP濃度は、ProGRPキャリブレーション溶液の発光量をもとに較正された検量線から自動的に算出されます。また複数装置をお使いの場合は1台ごとに検量線を作成してください。

キャリブレーションは以下の場合に行います。

- ・抗体結合粒子、酵素標識抗体、基質液のいずれかが、新しいロットに切り替わった場合。
 - ・キャリブレーションデータを更新後、30日が経過した場合。
- 上記以外においても必要が生じた場合は、キャリブレーションを測定しキャリブレーションデータを更新してください。

検体中のProGRP濃度が、5000pg/mLを超える場合は、検体希釈液ProGRPを用いて希釈し、再測定してください。

■測定結果の判定法

1. 参考正常値

健康者113例の血清およびEDTA-二カリウム血漿中のProGRP濃度を所定の操作で測定し、測定値を対数変換で正規化して求めたところ、それぞれ、平均値は40.4pg/mLおよび44.6pg/mL、平均値+1.96SDは67.5pg/mLおよび75.3pg/mLとなりました。

2. 判定上の注意

- (1) 基準範囲は、測定条件や検体によって異なることがありますので、各施設に適した基準範囲を設定してください。
- (2) 検体中に存在する未同定の非特異反応性物質の影響により、まれに測定値が正確に得られない場合がありますので、他の検査結果や臨床症状等もあわせて考慮し、総合的に判断してください。
- (3) クレアチニン値1.6mg/dL以上を示す良性腎疾患患者では、健康者と比較して、測定値が高値を示すことがあります¹⁾。
- (4) 血清中と血漿中でのProGRPの安定性が異なるため、血清と血漿のProGRP測定値が異なる場合があります。

■臨床的意義

ガストリン放出ペプチド(gastrin releasing peptide: GRP)は、1978年McDonaldらがブタ胃組織より単離した、ガストリン分泌促進作用を有する27個のアミノ酸からなるペプチドです²⁾。

ヒトGRP遺伝子は、1984年にクローニングされました³⁾。さらに、オルタネイティブスプライシングによって3種類のGRPメッセージャーRNAが生成され、活性を有するN末端側のGRPの構造は同一であるが、C末端側の構造の異なる3種類のGRP前駆体(ProGRP)が産生されることが明らかにになりました⁴⁾。産生された3種類のProGRPは、活性を有する構造が同一であることが確認されています。

肺癌とGRPの関係は、1978年にヒト胎児肺に存在する内分泌細胞のボンベシン免疫活性が証明されたことに始まります⁵⁾。

1983年国立がんセンターの山口らはこの内分泌細胞から発生すると考えられている肺小細胞癌についてGRP産生能を検討し、GRPが重要な産物であることを証明し⁶⁻⁷⁾、さらに血中GRP濃度の測定が肺小細胞癌患者において優れた腫瘍マーカーとなることを明らかにしました⁸⁾。さらに、GRPよりも血中で安定であるProGRPに対する抗体を利用したRIA(radioimmunoassay)系を構築し、多数の肺癌症例を検討したところ、血中ProGRP濃度の測定が臨床的応用可能な肺小細胞癌の腫瘍マーカーであることを確認しました⁹⁾。

本試薬は化学発光基質(AMPPD)を用いた化学発光酵素免疫測定法¹⁰⁾(CLEIA; chemiluminescent enzyme immunoassay)に基づく試薬で、全自動化学発光酵素免疫測定システム(代表例:ルミパルス Presto II)用試薬です。

■性能

1. 性能

(1) 感度

ProGRPキャリブレーションを所定の操作で測定するとき、50pg/mL ProGRPキャリブレーション溶液と0pg/mL ProGRPキャリブレーション溶液の発光量の比は11以上になります。

(2) 正確性

自家管理検体3例を所定の操作で測定するとき、測定値は各管理値に対して±20%以内になります。



IU07

- (3) 同時再現性（併行精度）
自家管理検体を所定の操作で6回繰り返し測定するとき、変動係数（CV値）は10%以下になります。
- (4) 測定範囲
本試薬の測定範囲は、2～5000 pg/mLです。全自動化学発光酵素免疫測定システム（代表例：ルミパルス Presto II）では0.1 pg/mLから出力されます。
- (5) 検出限界
0 pg/mL ProGRPキャリブレーション溶液と希釈したProGRP溶液を所定の操作で20回繰り返し測定し、0 pg/mL ProGRPキャリブレーション溶液の平均値+3SDと、希釈したProGRP溶液の平均値-3SDが区別できる最小濃度を検出限界として求めたとき、値は0.8 pg/mLとなりました。
- (6) 定量限界
希釈したProGRP溶液を所定の操作で20回繰り返し測定し、測定値の変動係数（CV値）が10%以下となる最小濃度をもとに、測定間差を考慮して定量限界を求めたとき1.5 pg/mLとなりました。

2. 相関性試験成績

- (1) 既存EIA法試薬（1）との相関性
血清検体127例を使用し、既存EIA法試薬（1）との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数 : n = 127
相関係数 : r = 0.993
回帰式 : y = 0.98x + 3.13
(x : 既存EIA法試薬（1）、y : 本品)
- (2) 既存EIA法試薬（2）との相関性
血清検体121例を使用し、既存EIA法試薬（2）との相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数 : n = 121
相関係数 : r = 0.998
回帰式 : y = 1.00x + 4.25
(x : 既存EIA法試薬（2）、y : 本品)
- (3) 血清・血漿相関性
同一人から採取した血清・血漿ペア検体123例（抗凝固剤：EDTA-二カリウム）を使用し、本試薬にて相関性を検討した結果、以下に示す成績が得られました。
測定例数 : n = 123
相関係数 : r = 1.000
回帰式 : y = 1.05x + 1.74 (x : 血清、y : 血漿)

■使用上又は取扱い上の注意

1. 取扱い上（危険防止）の注意

- (1) 検体はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取扱ってください。
- (2) 検査にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるビベティングを行わないでください。
- (3) 基質液はアルカリ性溶液（pH10）です。使用に際しては、液が皮膚についたり、目に入らないように注意してください。
- (4) 試薬が誤って目や口に入った場合は、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば、医師の手当等を受けてください。

2. 使用上の注意

- (1) 使用に際しては本書、装置の添付文書ならびに取扱説明書に記載された使用方法に従ってください。
- (2) 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。各構成試薬外箱および容器の表示をご確認のうえ使用してください。
- (3) サンプリングチップ、キュベット、サンプルカップは指定のものを使用してください。
- (4) サンプリングチップ、キュベット、サンプルカップは常に新しいものを使用してください。
- (5) ProGRPキャリブレーションは、常温（15～25℃）に戻してから使用してください。
- (6) 試薬は保存条件を守って使用してください。特に凍結しないように注意してください。
- (7) 本試薬は装置にセットしたまま保存することができます。開封後の抗体結合粒子、酵素標識抗体および検体希釈液ProGRPは30日間有効です。装置にセットした後は、30日以内に使用してください。
- (8) 検体、ProGRPキャリブレーション溶液は蒸発による濃縮を考慮し、サンプルの準備後は速やかに測定を開始してください。
- (9) 粒子が再懸濁されない場合、使用せず弊社までお問い合わせください。
- (10) 調製後のProGRPキャリブレーション溶液は2～10℃に保存した場合、1週間は安定です。
- (11) 新しいボトルを装置にセットする際には、新しいアッセイキャップを取付けてから使用してください。取付けない場合は、測定結果の信頼性は保証できません。
- (12) 装置から取出して試薬を保存するときは、アッセイキャップを取外し試薬のボトルキャップに取替えてから2～10℃で保存してください。アッセイキャップを取付けたまま保存した場合は、測定結果の信頼性を保証できません。再度ボトルを装置にセットする際には、新しいアッセイキャップを使用してください。
- (13) アッセイキャップを取付けるときは、汚染防止のため手袋を着用してください。
- (14) 箱に同封されている抗体結合粒子と酵素標識抗体のラベルには、同じ試薬ロットNo. が印字されています。試薬は、異なる試薬ロットNo. の組み合わせでは使用できません。ボトルはラベルの試薬ロットNo. を確認してから装置にセットしてください。
- (15) 試薬を混ぜ合わせて使用できません。

- (16) 正確な測定を行うために、精製水は常に新しいものを使用してください。
- (17) 基質液を装置にセットした後は、基質液交換時まで取外しは避けてください。基質液がアルカリホスファターゼ（ALP）に汚染されずと使用できません。手指が直接基質液に触れた場合は、廃棄してください。
- (18) ソーダライムは交換せずに長期間使用を続けると、二酸化炭素の吸収力が低下します。また基質キャップバックキンも交換せずに長期間使用を続けると、密閉性が失われ基質液を劣化させる原因となります。ソーダライムと基質キャップバックキンの交換時期についてはご使用の測定システムの取扱説明書をご覧ください。

3. 廃棄上の注意

- (1) 各試薬には保存剤として以下のとおりアジ化ナトリウムが含まれています。廃棄する際は爆発性の金属アジドが生成されないように多量の水とともに流してください。
洗浄液：1.0%（希釈調製前）
基質液、ProGRP用溶解液：0.05%
抗体結合粒子、酵素標識抗体、検体希釈液ProGRP：0.1%
ProGRPキャリブレーション：0.15%（調製時）
- (2) 試薬および容器等を廃棄する場合は、廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。
- (3) 廃液の廃棄にあたっては、水質汚濁防止法などの規制に従って処理してください。
- (4) 使用した器具（ピペット、試験管等）、廃液、サンプリングチップ等は、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等による消毒処理あるいは、オートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行ってください。
- (5) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000ppm、1時間以上浸漬）、グルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）等によるふき取りと消毒を行ってください。

■貯蔵方法・有効期間

抗体結合粒子	2～10℃に保存	有効期間：1年
酵素標識抗体	2～10℃に保存	有効期間：1年
ProGRPキャリブレーション	2～10℃に保存	有効期間：1年
ProGRP用溶解液	2～10℃に保存	有効期間：1年
基質液	2～10℃に保存	有効期間：9ヵ月
洗浄液	室温（1～30℃）に保存	有効期間：9ヵ月
検体希釈液ProGRP	2～10℃に保存	有効期間：1年

使用期限については、各構成試薬の外箱および容器の表示をご参照ください。

■包装単位

個別包装

コードNo.	品名	包装
** 297827	ルミパルスプレスト ProGRP (抗体結合粒子・酵素標識抗体)	200回用 (各10mL×1)
** 297834	ルミパルスプレスト ProGRP ProGRPキャリブレーションセット (ProGRP用溶解液を含む)	3濃度×2 (5mL×1)
291122	ルミパルスプレスト 基質液 (共通試薬)	100mL×6
291139	ルミパルスプレスト 洗浄液 (共通試薬)	4000mL×1
** 297841	ルミパルスプレスト ProGRP 検体希釈液ProGRP	10mL×1

その他

- **LPコントロール・ProGRP 2濃度×6
(コードNo. 297810)

■主要文献

1. 児玉哲朗 他: ELISA法による血清ProGRP測定の臨床的意義。医学と薬学。32: 87～97, 1994.
2. McDonald, T. J. et al. : A gastrin releasing peptide from the porcine non-antral gastric tissue. Gut, 19: 767～774, 1978.
3. Spindel, E.R. et al. : Cloning and characterization of cDNAs encoding human gastrin-releasing peptide. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 81: 5699～5703, 1984.
4. Spindel, E.R. et al. : Analysis of the gene and multiple messenger ribonucleic acids (mRNAs) encoding human gastrin-releasing peptide: Alternate RNA splicing occurs in neural and endocrine tissue. Mol. Endocrinol, 1: 224～232, 1987.
5. Wharton, J. et al. : Bombesin-like immunoreactivity in the lung. Nature, 273: 769～770, 1978.
6. Yamaguchi, K. et al. : Production and molecular size heterogeneity of immunoreactive gastrin-releasing peptide in fetal and adult lungs and primary lung tumors. Cancer. Res, 43: 3932～3939, 1983.

7. Yamaguchi, K. et al. : Peptide hormone production in small cell lung carcinomas with particular reference to gastrinreleasing peptide. Jpn. J. Clin. Oncol, 16: 235~241, 1986.
8. Maruno, K. et al. : Immunoreactive gastrin-releasing peptide as a specific tumor marker in patients with small cell lung carcinoma. Cancer. Res. , 49: 629~632, 1989.
9. Miyake, Y. et al. :Pro-gastrin-releasing peptide (31-98) is a specific tumor marker in patients with small cell lung carcinoma. Cancer. Res. , 54: 2136~2140, 1994.
10. Nishizono I, et al. : Rapid and sensitive chemiluminescent enzyme immunoassay for measuring tumor markers. Clinical Chemistry, 37: 1639~1644, 1991.

■問い合わせ先

富士レビオ株式会社 お客様コールセンター
TEL : 0120-292-832
FAX : 03-5695-9234

*本製品はLife Technologies Corporationから導入した技術に基づいて製造したものです。

